

Respirátor KN95 (ochrana úst) - bílý

Obchod: Armik.cz

E-mail: info@netnakup.cz

Telefon: +420 720 278 200

Odkaz: <https://armik.cz/respirator-kn95-ochrana-ust-bily/>



Kód zboží: KN95-STANDARD

Značka: Neзадán

Popis:

KN95 obličejová maska, filtrační efekt je až 95 procent. Vyrobeno z netkané textilie, odolné proti vlhkosti, netoxické, nedráždivé. Anti PM2.5, zákal, prach atd.

Čtyřvrstvá textilie s použitím vyspělých environmentálních materiálů účinně odolává jemným částicím a bakteriím při znečištění ovzduší. Čtyřvrstvý design, netkaná textilie s vysokou hustotou, filtrace - vysoce prodyšná netkaná textilie, která může zabránit prachu, výfukovým plynům, pylu atd.

Respirátor nebo respirační rouška po nasazení filtruje vzduch, který vdechujete a zachycuje škodlivé látky, aby se nedostaly do vašeho dýchacího systému. Používání respirátoru je doplňkovou ochranou, stejně jako ochranné brýle nebo ochranný oděv. Respirátor je jednorázová ochranná pomůcka a běžně je určena na 8 hodinové použití.

Vlastnosti:

- hmotnostní průtok vzduchu: 85 l/min
- aerosolová částice: NaCl
- koncentrace aerosolu: 15 mg/m³
- relativní vlhkost: 35,8 %
- účinnost filtru: $\geq 95,0$ (KN95)
- inhalační odpor (Pa): ≤ 350 (GB 2626-2006 6.5)
- exspirační odpor (Pa): ≤ 250 (GB 2626-2006 6.6)

Návod k použití:

1. Před prvním použitím je nutná důkladná hygiena rukou pomocí mýdla a teplé vody. Po umytí rukou přiložte vrchní část respirátoru k obličejí a následně přitlačte na obličej jeho spodní část.
2. Když respirátor dokonale přilne k vaší tváři, upravte elastické popruhy tak, aby ho udržovali v bezpečné poloze.
3. Správně nasazená ochranná maska musí těsně doléhat k obličejí a má zakrývat ústa, nos i bradu.
4. Muži by měli být oholení, protože brada může způsobit netěsnosti.
5. Při snímání masky se dotýkejte pouze popruhů, ne části, která filtruje vzduch.

Parametry:

- Třída ochrany: KN95
 - Univerzální velikost
 - Balení: 1 ks
-

Fotky: