

Respirátor Y&G 9520 KN95 - bílý

Obchod: Armik.cz

E-mail: info@netnakup.cz

Telefon: +420 720 278 200

Odkaz: <https://armik.cz/respirator-y-g-9520-kn95-bily/>



Kód zboží: 9520

Značka: Neзадán

Popis:

KN95 obličejová maska, filtrační efekt je až 95 procent. Vyrobeno z netkané textilie, odolné proti vlhkosti, netoxické, nedráždivé. Anti PM2.5, zákal, prach atd.

Cena za 1 ks respirátoru. Univerzální velikost.

Certifikovaná respirační rouška je normy KN95. Ochranná norma KN95 je doporučována Světovou zdravotnickou organizací (WHO) jako minimálním standardem ochrany!

Čtyřvrstvá textilie s použitím vyspělých environmentálních materiálů účinně odolává jemným částicím a bakteriím při znečištění ovzduší.

Čtyřvrstvý design, netkaná textilie s vysokou hustotou, filtrace - vysoce prodyšná netkaná textilie, která může zabránit prachu, výfukovým plynům, pylu atd.

Respirátor nebo respirační rouška po nasazení filtruje vzduch, který vdechujete a zachycuje škodlivé látky, aby se nedostaly do vašeho dýchacího systému. Používání respirátoru je doplňkovou ochranou, stejně jako ochranné brýle nebo ochranný oděv. Respirátor je jednorázová ochranná pomůcka a běžně je určena na 8 hodinové použití.

Správné nasazení masky

Před prvním použitím je nutná důkladná hygiena rukou pomocí mýdla a teplé vody. Po umytí rukou přiložte vrchní část respirátoru k obličejí a následně přitlačte na obličej jeho spodní část. Když respirátor dokonale přilne k vaší tváři, upravte elastické popruhy tak, aby ho udržovali v bezpečné poloze. Správně nasazená ochranná maska musí těsně doléhat k obličejí a má zakrývat ústa, nos i bradu. Muži by měli být oholení, protože brada může způsobit netěsnosti. Při snímání masky se dotýkejte pouze popruhů, ne části, která filtruje vzduch.

Parametry

Hmotnostní průtok vzduchu: 85 l/min

Aerosolová částice: NaCl

Koncentrace aerosolu: 15 mg/m³

Relativní vlhkost: 35,8 %

Účinnost filtru: ≥ 95,0 (KN95)

Inhalační odpor (Pa): ≤ 350 (GB 2626-2006 6.5)

Exspirační odpor (Pa): ≤ 250 (GB 2626-2006 6.6)

Toto zboží nelze z hygienických důvodů vrátit bez udání důvodu ve 14-ti denní lhůtě.

Parametry:

- Třída ochrany: KN95

Fotky:

